

1 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

INTRACE SYRINGE предназначен исключительно для мечения животных. Использовать его разрешается только для этой цели! Мечение людей и любые другие варианты использования строго запрещены! Вся ответственность за использование изделия лежит на заказчике.

Имплантацию чипа следует проводить под руководством ветеринарного врача.

2 ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. Просканируйте микрочип, который имеется в упаковке, и проверьте, соответствует ли отсканированный номер номеру, напечатанному на наклейке со штрих кодом.
2. Подготовьте место для инъекции: подкожно на дорсальной (спинной) срединной линии краниально (по направлению) к лопатке слева.
3. Осторожно снимите защитный колпачок с иголки шприца.
4. Необходимо очистить и провести обеззараживание предполагаемого места вживления чипа. Затем полностью введите иглу до конца подкожно, до самого основания иглы.
5. Вводите микрочип, нажимая на поршень и толкая его вперед. Продолжайте до полного введения поршня до тех пор, пока он полностью не войдет внутрь цилиндра шприца, что будет подтверждено двумя щелчками.
6. Когда будете вынимать иглу, надавливайте на кожу вокруг иглы.
7. При возникновении кровотечения слегка надавите пальцем на кожу в месте вживления.
8. Еще раз отсканируйте животное, чтобы еще раз проверить идентификационный номер.
9. Утилизируйте использованный шприц в соответствии с правилами и местными нормами.
10. Зарегистрируйте животное и информацию о владельце в соответствующей базе данных.

3 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не использовать шприц повторно.
- После вскрытия упаковки шприц не нужно стерилизовать в автоклаве, если он не используется.
- Хранить шприц следует при комнатной температуре.

В результате многолетних исследований и практических наработок были выработаны единые правила, касающиеся мест имплантации микрочипов различным видам животных:

- Собаки и кошки — подкожно между лопаток (по средней линии в районе холки)
- Лошади — с левой стороны шеи в выйную связку
- Коровы и свиньи - подкожно в основание левого уха
- Рыбы > 30 см — во внутреннюю сторону левого спинного плавника, < 30 см — в полость матки

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИКРОЧИПА


Стандартный стеклянный микрочип EM4305 с париленовым покрытием.

Программирование стеклянного микрочипа.

Микрочип программируют и блокируют непосредственно в процессе изготовления. Программирование осуществляется в соответствии со стандартами ISO11784 и ISO11785.

Возможный диапазон кодов PID - 643 093 9XX XXX XXX.

- 643 – код страны России.
- 0939 – код производителя.
- XXX – код животного.

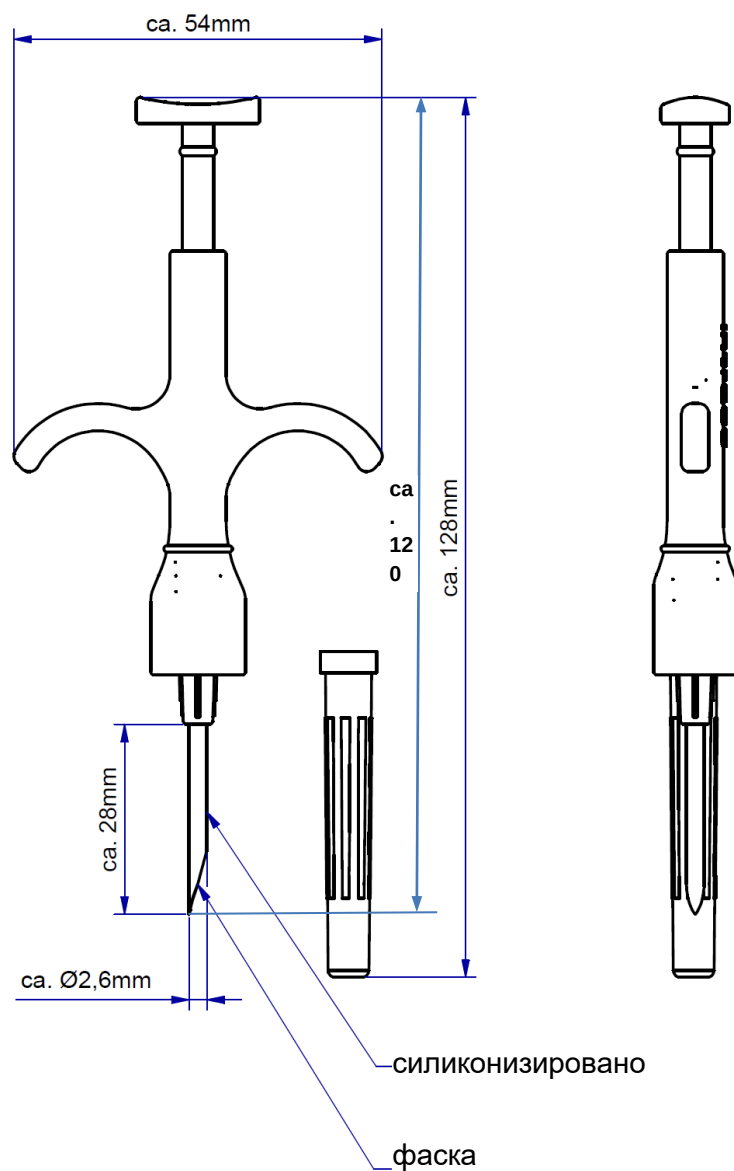

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭТИКЕТКИ СО ШТРИХ-КОДОМ

5.1 ЭТИКЕТКА СО ШТРИХ-КОДОМ

Каждый INTRACE SYRINGE снабжен отдельной этикеткой со штрих-кодом. Этикетка состоит из заголовка и шести наклеек с одинаковыми штрих-кодами.



5.2 ЗАГОЛОВОК ЭТИКЕТКИ

Заголовок этикетки содержит информацию об изделии, см. иллюстрацию выше.

5.3 ДАТА СТЕРИЛИЗАЦИИ

При нормальных условиях хранения и неповрежденной упаковке изделие, как правило, остается стерильным на протяжении пяти лет с даты изготовления.

5.4 КОНТРОЛЬНАЯ СУММА

На основе пятнадцатизначного идентификационного кода животного, заданного в десятичной системе счисления, вычисляется контрольная сумма CRC. Полученное значение печатается на этикетке в шестнадцатеричном виде.

5.5 НАКЛЕЙКА СО ШТРИХ-КОДОМ

Заданный идентификационный код животного указывается на наклейке в виде десятичного числа и в виде штрих-кода.

Формат штрих-кода: «Code 128»; Arial Rounded MT Bold / нормальный / 10.

6 УПАКОВКА

Шприц в комплекте с запрограммированным микрочипом и этикеткой со штрих-кодом упакован в мягкую блистерную упаковку. Размеры блистерной упаковки: 120 x 250 x 12,5 мм (допустимое отклонение +/- 5 мм).

Условия хранения

Чтобы изделие оставалось стерильным на протяжении всего периода хранения, необходимо соблюдать следующие условия:

Температура:

Рекомендуется комнатная температура (не ниже 0 °С, не выше 50°С; изделие выдерживает пограничные значения температуры на протяжении не менее 168 часов);

Относительная влажность воздуха:

Влажность 40—60 %, хранить в сухом месте.

Хранить в темном месте, избегать попадания прямых солнечных лучей.

Защитную упаковку следует вскрывать непосредственно перед использованием изделия.

Хранить вдали от химикатов и моющих средств.

7 СПОСОБ СТЕРИЛИЗАЦИИ

Для стерилизации канюли используется окись этилена. При нормальных условиях хранения изделие остается стерильным, как правило, на протяжении 5 лет с даты изготовления. См. раздел «Условия хранения».