


*My*FILLER

Revitalize



MESOTHERAPY
ПРОТОКОЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ

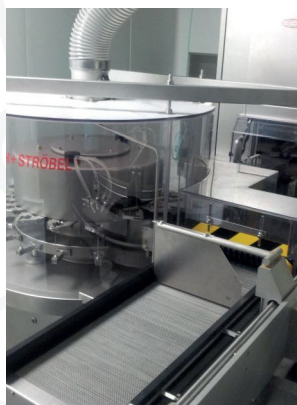

PRODUCTION

Линейка мезотерапевтических сывороток **My Filler Revitalize** — это ультрасовременный ассортимент стерильной косметики местного применения для профессионального использования, разработанный компанией My Med Kft.

My Med — европейский производитель медицинских изделий III класса, успешно работающий в сфере эстетической медицины более 15-ти лет.

Имеющиеся компетенции и стремление создавать продукцию высочайшего качества позволили специалистам My Med расширить ассортимент инъекционных дермальных наполнителей бренда **My Filler** и создать специальную линейку препаратов для мезотерапии **My Filler “Revitalize”**.

При производстве **My Filler** и **My Filler Revitalize** используется современное оборудование, которым управляет высококвалифицированный и опытный персонал. Производственный процесс, начиная с приема и хранения сырья, автоматизированной стерилизации флаконов и шприцев, контроля рецептуры и качества продукции, полностью автоматизированного розлива препаратов в шприцы и флаконы, заканчивая окончательной упаковкой и транспортировкой, соответствует всем европейским правилам и стандартам, применимым к медицинским изделиям III класса.

MyFILLER



MyFILLER Revitalize Pure

Revitalize Pure подходит для всех типов кожи, нуждающейся в восстановлении структуры и тона.

Состав:

- гидролизованный коллаген 5%, производная костного желатина группы В;
- высокомолекулярная гиалуроновая кислота 1,45 MDA 1,2%.

REVITALIZE PURE

MYF500

Основные показания:

- признаки первых возрастных изменений кожи (сухость, эластоз, телеангиэктазии);
- гравитационный птоз;
- глубокие морщины;
- растяжки, рубцы, следы постакне;
- усиление эффекта биостимуляторов (Radiesse, нити из PDO, PLA);
- подготовка пациентов к агрессивным аппаратным и операционным методикам.

Эффект:

- глубоко увлажняет;
- стимулирует регенерацию;
- повышает упругость кожи;
- разглаживает морщины;
- выравнивает поверхностный рельеф.

Техники введения:

папульная, «бугорками», болюсная, линейно-ретроградная. Диаметр иглы 30G, глубина введения 6-12 мм. Расход наполнителя на одну процедуру — 2,5-5 мл (лицо + шея).

Схема курса:

- 1 месяц — 1-2 сеанса;
- 2,3 месяц — по 1 сеансу соответственно.



Правила работы в периорбитальной зоне:

- Общее количество препарата — не более 0,2 мл.
- Для уменьшения риска длительного «стояния» папул рекомендуется разведение коктейля физиологическим раствором NaCl в пропорции 1:1 либо его глубокое введение по проекции костного края орбиты.
- Рекомендованная техника — «бисер» иглой 32G, предусматривающая глубокие вколы.
- Оптимальный курс рассчитан на 4 процедуры с интервалом в 10-14 дней.
- Периодичность курсов — 2 раза в год.

My FILLER Revitaliz Vitamins



Формула **Revitalize Vitamins** содержит 70 компонентов, необходимых для восстановления и поддержания красоты и здоровья кожи.

Состав:

- высокомолекулярная гиалуроновая кислота 1,45 MDa 0,5%;
- витамины группы В (В8, В7, В2, В1, В10), РР, Е, С;
- минералы (гуминовая кислота и др.);
- коферменты (коэнзим А и пр.);
- незаменимые аминокислоты.

REVITALIZE VITAMINS

MYF501

Основные показания:

- сухость, увядание кожи, свойственное пациентам старше 40 лет;
- пятна гиперпигментации;
- расширенные поры;
- тусклый цвет лица;
- поддержание эффекта биостимуляторов (Radiesse, нити из PDO, PLA);
- алопеции различного генеза;
- явления постакне;
- профилактика фотостарения в летний период.

Эффект:

- активно увлажняет, отбеливает;
- уплотняет ткани;
- предотвращает гиперпигментацию;
- борется с признаками старения;
- регулирует работу сальных желёз, сужает поры;
- стимулирует рост волос;
- оказывает противовоспалительное действие.

Техники введения:

папульная, классическая иглой 30G на глубину 6-12 мм. Расход наполнителя на одну процедуру — 2,5-5 мл (лицо + шея).

Рекомендованный курс: 4-6 процедур с интервалами в 7-10 дней.

Допускается комбинированное введение Revitalize Vitamins и Revitalize Pure по 2,5 мл в соотношении 1:1 по технологии «бугорков».



Правила работы в периорбитальной зоне:

- Общее количество препарата — не более 0,2 мл.
- Для уменьшения риска длительного «стояния» папул рекомендуется разведение коктейля физиологическим раствором NaCl в пропорции 1:1.
- Рекомендованная техника — «бисер» иглой 32G.
- Курс проводится 2 раза в год.

MyFILLER



MyFILLER

Revitaliz White Skin

Сыворотка **Revitaliz White Skin**, действуя в глубоких слоях дермы, эффективно осветляет кожу, выравнивает тон, сокращает количество пигментных пятен.

Состав:

- койевая кислота 0,8%;
- ретинол 0,5%;
- аскорбиновая кислота (витамин С) 1,8%.

REVITALIZE WHITE SKIN

MYF505

Основные показания:

- гиперпигментация различного генеза;
- сухая тусклая увядающая кожа;
- мимические и статические морщины лица, шеи и зоны декольте;
- деформационный птоз легкой степени;
- склонность к пастозности лица;
- следы постакне (застойные пятна, растяжки, рубцы);
- купероз, розацеа первой степени.

Эффект:

- отбеливает, нормализует тон кожи;
- сужает поры;
- укрепляет сосуды;
- снимает воспаление;
- очищает зрелую кожу на межклеточном уровне.

Техники введения:

аппликации на всю поверхность кожи, исключая периорбитальную область. Проработка дермаленом по горизонтали и вертикали на глубину 0,25-0,5 мм. Количество препарата на одну эстетическую зону — 2,5 мл (лицо + шея).

Курс 6-8 процедур с интервалами в 7-10 дней.



Перед проведением процедуры «микронидлинг» рекомендовано нанесение аппликационной анестезии, а также 1-го слоя салицилового пилинга.



MyFILLER RevitalizBody



Активное действие **Revitalize Body** направлено на возвращение коже упругости за счёт восстановления коллагеновых волокон, устранение эффекта дряблости.

Состав:

- органический кремний 2,5%;
- ДМАЭ 1%;
- пантенол.

REVITALIZE BODY

MYF502

Основные показания:

- пациенты старше 35 лет с выраженными признаками сухости и увядания кожи;
- гравитационный птоз;
- снижение дермального тонуса, в том числе вследствие механического, химического пилинга, лазерного воздействия;
- стрии, рубцы, следы постакне;
- птоз бровей после неудачно введенного нейропротеина.

Эффект:

- подтягивает, повышает плотность;
- улучшает тон кожи;
- выравнивает рельеф;
- реструктуризирует ткани;
- стимулирует неоколлагенез;
- снимает побочные эффекты ботулинотерапии.

Техники введения:

папулярная, бугорковая, линейно-ретроградная, биоармирование. Последняя предполагает канюльную и / или игольную сепарацию. Максимальное количество коктейля на одну процедуру — 5 мл.

Области применения:

лицо, шея, декольте, внутренняя поверхность плеча, бедр, передней брюшной стенки.



Revitalize Body используют в сочетании с препаратом **Revitalize Slim** при работе по телу (вторым этапом).

Расход — 2,5-5 мл на процедуру (лицо + шея, тело).

Оптимальный курс: 4-5 процедур с интервалами в 7-10 дней.

Периодичность проведения курсов — 2 раза в год.

MyFILLER



MyFILLER Revitaliz Slim

Revitaliz Slim — препарат липолитического, антицеллюлитного действия для устранения локальных жировых отложений на лице и теле.

Состав:

- дезоксихолат 1,5%;
- фосфатидилхолин 2,5%;
- карнитин 4%;
- инсулиноподобный фактор роста.

REVITALIZE SLIM

MYF503

Основные показания:

- локальные жировые отложения в области овала лица, «двойной» подбородок;
- лимфожировая «холка»;
- видоизменения внутренней поверхности плеч, бедер, боков и ягодиц, сформированные липидными отложениями;
- отечный целлюлит 2-3 степени («апельсиновая корка»).

Эффект:

- уменьшает объем подкожно-жировой клетчатки;
- стимулирует микроциркуляцию;
- выравнивает рельеф кожи.

Лимфожировая «холка»:

Курс рассчитан на 6-8 процедур с интервалами в 10-14 дней. Инъекции выполняют инфильтрационной техникой на глубину 6-13 мм в зависимости от толщины подкожно-жировой клетчатки. Частота шага — 10-15 мм. Расход препарата на один вкол — 0,1 мл, на процедуру — 3-6 мл.

Для коррекции лимфожировой «холки» в области шейно-грудного отдела позвоночника рекомендуется сочетание липолитической мезотерапии с курсом лечебного массажа.





Локальные грыжевые отложения в области овала лица, «двойной» подбородок

Коррекционный курс — 4-6 процедур с интервалами в 10-14 дней.

Препарат вводится по технологии инфильтрации на глубину от 4 до 13 мм в зависимости от толщины подкожно-жировой клетчатки. Количество наполнителя на один вкол — 0,1 мл. Расстояние между инъекциями — 10 мм. На одну процедуру требуется 3-6 мл препарата.

Для коррекции локальных жировых отложений в области овала лица и «двойного» подбородка рекомендуется сочетание липолитической мезотерапии с аппаратными методиками, в частности SMAS-лифтингом, лимфодренажными процедурами (массаж, микротоки), тредлифтингом (мезонити).

Внутренняя поверхность плеча

Курс 4-6 процедур с интервалами в 10-14 дней.

Препарат вводится инфильтрационным методом по внутренней поверхности плеча на глубину 4-6 мм. На один вкол расходуется 0,1 мл препарата. Расстояние между инъекциями 10-15 мм. Общее количество препарата на одну процедуру 3-6 мл.

Для коррекции локальных жировых отложений и атонии кожи в области внутренней поверхности плеча рекомендуется сочетание липолитической мезотерапии с аппаратными методиками, в частности с микроигльчатый RF-лифтингом, тредлифтингом (мезонити).

MyFILLER



MyFILLER RevitalizHAIR

Инновационный мультикомплексный коктейль **Revitalize Hair** питает кожу головы, способствует росту волос.

Состав:

- высокоочищенная фармацевтическая гиалуроновая кислота 0,5%;
- DHQG (дигидроквертецин глюкозид);
- EGCG — глюкозид;
- глицин;
- цинк.

REVITALIZE HAIR

MYF504

Основные показания:

- алопеции различного генеза;
- жидкая себорея волосистой части головы;
- стимуляция роста, укрепление волос;
- профилактика выпадения волос после перенесенных заболеваний и стрессов.

Эффект:

- активизирует обмен веществ, лимфоток и микроциркуляцию в области волосистой части головы;
- способствует регенерации волосяных лукович;
- выводит токсины.

Техники введения:

Препарат вводят в кожу волосистой части головы по проборам на глубину не более 1-2 мм, применяя аппаж, классическую или папульную техники. Количество препарата на одну процедуру — 2,5 мл.



Протокол введения:

- Полный курс включает 6-8 процедур с интервалами 7-10 дней.
- Поддерживающие манипуляции — 1 раз в 1 месяц.





*My*FILLER
Revitalize
○ ○ ○ ○