



## **БОКС-ПЫЛЕСБОРНИК ОТКРЫТЫЙ Бокс-01 «Аверон»**



**Этикетка  
АВЕ 487.000.000 ЭТ  
6.0 БИГ**

РУ № ФСР 2012/13285 от 06.04.2012

Декларация о соответствии  
РОСС RU.АГ81.Д18675 от 30.11.2017

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящий документ распространяется на Бокс-пылесборник открытый Бокс-01 «Аверон», ТУ 9452-012-25014322-2002, ОКП 94 5220, 6.0 БИГ (далее - **БОКС**).

1.2 **БОКС** предназначен для комплектования автономного рабочего места по механической обработке изделий в зуботехнической, литейной лабораториях стоматологических учреждений.

**БОКС** совместно с внешним Устройством пылевсасывающим зуботехническим\* (УПЗ) используется для удаления и утилизации отходов, а также защиты персонала при работе с шлифмотором\*.

### 1.3 Условия эксплуатации

- окружающая температура ..... 10...35°С
- влажность при 25 °С, не более .....80%

### 1.4 Основные технические характеристики

- масса, не более ..... 2,5 кг
- габариты, не более ..... 270х330х275 мм



Рис.1

## 2 КОМПЛЕКТНОСТЬ (рис.1-4)

- 1 – корпус с полкой (6)
- 2 – лоток пластиковый - 2 шт
- 3 – экран защитный ЩИТ 1.0 У
- 4 – дополнительный защитный гибкий экран
- 5 – держатели экрана

Этикетка АВЕ 487.000.000 ЭТ

- 7 – светильник светодиодный ЛЮКС 2.1\*
- 8 – светильник светодиодный ЛЮКС 3.0

Примечание:  - поставка по дополнительной заявке

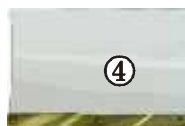


Рис.2



Рис.3

## 3 КОНСТРУКЦИЯ

3.1 Экран (3) защищает лицо и глаза техника от возможного попадания пыли и крупных частиц, в том числе при разрушении инструмента.

3.2 Дополнительный защитный экран (4) препятствует попаданию отходов обработки на одежду техника.

3.3 Смещение вытяжного отверстия от центра предотвращает попадание крупных отходов и абразива в вытяжку.

3.4 Рекомендуется один лоток применять для сбора отработанной жидкости при полировке пластмасс, а другой – для отходов при полировке металлов.



Рис.4

\* - эксплуатация, обслуживание и гарантии согласно своей сопроводительной документации.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

## 4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Установить:

- **БОКС** и шлифмотор на ровную, устойчивую, горизонтальную поверхность;
  - экран **(3)** в держателях **(5)** так, чтобы его **верхний край упирался в потолок БОКСА**, а плоскость экрана не касалась шлифовального круга, в этом положении зафиксировать экран винтами держателя;
- при наличии, светильник ЛЮКС 2.1 **(7)** или ЛЮКС 3.0 **(8)**, поставляемые по дополнительной заявке;
- лоток **(2)** емкостью внутрь **БОКСА**;
- дополнительный защитный экран **(4)** на экран **(3)**, для чего:
  - обезжирить не защищенную пленкой нижнюю часть экрана **(3)**;
  - удалить защитную пленку со скотча на гибком экране **(4)**;
  - приклеить экран **(4)** на обезжиренную область экрана **(3)** с внешней стороны, располагая скотч по краю;
  - снять защитную пленку с экрана **(3)**;
  - планку гибкого экрана **(4)** разместить в лотке **(2)**.

Подсоединить шланг от внешнего **УПЗ** к резиновой втулке.

Включить **УПЗ**, светильник, шлифмотор и приступить к работе.

По окончании работ выключить используемые устройства.

## 5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По мере необходимости:

- очистить пластиковый лоток от производственных отходов;
- протереть внутренние, наружные поверхности, экраны от пыли влажной мягкой тканью (губкой);
- очистить внутреннюю поверхность **БОКСА** при помощи **УПЗ**.

## 6 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи или, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется на защитные экраны **(3 и 4)**, а также лакокрасочное покрытие деталей из-за естественного износа при предусмотренном использовании.

Срок службы - не менее 5 лет. Критерием предельного состояния является невозможность или технико-экономическая нецелесообразность восстановления работоспособности.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.

**Изготовитель:**

**620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3**

**ООО «ВЕГА-ПРО»**

**бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20**

**тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72**

**Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23**

**бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02**

[www.averon.ru](http://www.averon.ru)

[feedback@averon.ru](mailto:feedback@averon.ru)

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

6.0 БИГ	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,  
то гарантия исчисляется с даты выпуска.



научно-производственный комплекс

### Учебный центр АВЕРОН

приглашает на обучение  
зубных техников, врачей,  
руководителей и администраторов  
стоматологических учреждений

Программа на  
<http://www.uc-averon.ru>

