



ПОДСТАВКА для ОХЛАЖДЕНИЯ ОПОК модель КУЛЕР 1.0 ОПОКА



**Этикетка
АВЕ 408.000.000 ЭТ**

Изготовитель: 620102, Россия,
Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО»
бесплатный звонок по России 8 800 700-12-20
тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72
Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23
бесплатный звонок по России 8 800 700-11-02

www.averon.ru

feedback@averon.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей
технической документации

Исправления не допускаются

модель КУЛЕР 1.0 ОПОКА	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	м.п. _____ (подпись, печать)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Подставка для охлаждения опок модель КУЛЕР 1.0 ОПОКА (далее - КУЛЕР) предназначена для ускоренного охлаждения опок.

1.2 Условия эксплуатации

- окружающая температура 10...35°C
- влажность при 25 °С, не более 80%

1.3 Основные характеристики

электропитание*	~220/230В 50/60Гц 0,3А
max количество опок х9	15 шт
габариты (ШхГхВ), не более	555х300х190 мм
масса, не более	6 кг

* - вставка плавкая ВП2Б-1В-1А-250- 1шт.;

1.4 Комплектность

КУЛЕР (1)	1 шт.
Решетка (2)	1 шт.
Этикетка АВЕ 408.000.000 ЭТ	1 шт.

Полка ПОЛКА 1.1 БРИДЖ ПЛЮС



2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Розетка электропитания должна иметь контакт защитного заземления.

Не допускать попадания посторонних предметов в вентиляторы (3).

Не касаться неостывших опок руками без средств защиты.

При длительных перерывах в работе выключать вилку шнура питания из розетки.

3 РАБОТА

- Включить вилку сетевого шнура в розетку ~220/230В 50/60Гц (см. Меры безопасности).
- Разместить горячую опоку (5) на решетке (2).

Внимание !



Для максимальной эффективности работы КУЛЕРА заполнение короба горячими опоками следует производить с противоположной стороны от вентиляторов.

- Включить питание выключателем (4) на боковой стенке прибора.
- После остывания опок отключить питание выключателем (4).

4 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок - 24 месяца с даты продажи, если не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или не санкционированного Изготовителем доступа в конструкцию.