




МОДУЛЬ ВЫТЯЖНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ серии ВМУ

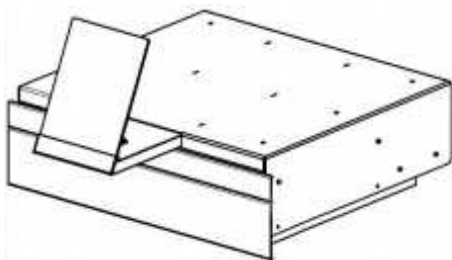

Декларация о соответствии
ТС № RU Д-RU.AY04.B.21671 от 16.07.2015

**Этикетка
ABE 365.000.001 ЭТ**

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящий документ действителен для Модуля вытяжного универсального серии ВМУ. ТУ 4863-047-52331864-2015. 2.0 КОМПЛЕКТ (далее – Модуль). Предназначен для работы с внешней вытяжкой.

1.2 Особенности

- Модуль выполнен из металла и предназначен для комплектования столов при организации автономных рабочих мест по механической обработке изделий и при проведении других аналогичных работ.
- Воздушный канал подключается к внешней вытяжке для удаления сухих мелко/среднедисперсных отходов. Рекомендуется Устройство пылевсасывающее зуботехническое УПЗ-Бокс-01 «Аверон», далее - УПЗ.
- Быстросъемный экран предохраняет лицо и глаза пользователя от возможного попадания в них пыли и крупных частиц, в том числе при разрушении инструмента.

1.3 Условия эксплуатации

- окружающая температура 10-35 °С
- влажность при 25°С, не более 80 %

1.4 Основные технические характеристики

- габариты 495×435×160 мм
- масса, не более 10 кг
- диаметр подсоединяемого шланга .45 мм
- крепление к столешнице толщиной 20..50 мм
- максимальная нагрузка на направляющие ящиков 5 кг

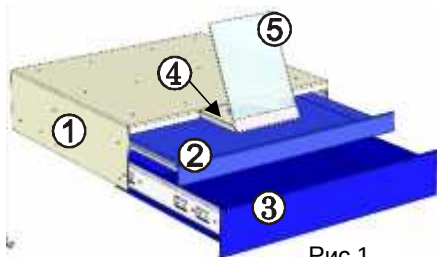


Рис.1

1.5 Комплектность (рис.1-3) шт

1 — Рама	- 1
2 — Ящик верхний	- 1
3 — Ящик нижний	- 1
4 — Платформа выдвижная	- 1
5 — Экран защитный ЩИТ 1.0У	- 1
6 — Втулка сопряжения	- 1
Саморез с пр-ш 4,2×19	- 8
Этикетка АВЕ 365.000.001 ЭТ	

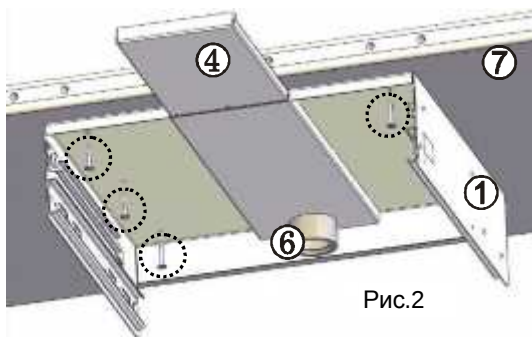


Рис.2

☒ - Экран защитный ЩИТ 3.0 ФЛЕКС

☒ – поставка по дополнительной заявке

2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

2.1 Распаковать, при выявлении нарушений тары, внешнего вида и комплектности зафиксировать их и обратиться к Поставщику.

2.2 Порядок сборки (рис.1-4)

- вынуть из рамы **(1)** платформу **(4)** и ящик верхний **(2)**;
- выдвинуть полностью нижний ящик **(3)** и снять его с направляющих, нажав на пластиковые рычажки в направляющих. При снятии ящика не допускать рывки и перекосы.



Рис.3

- закрепить раму снизу столешницы **(7)** СУЛ/СЗТ 4.x АБЕРОН (деревянной или из постформинга) саморезами из комплекта; на СЗТ 4.3 МАСТЕР (металлическая столешница) – крепление винтами, установленными по месту (см. разметку на обратной стороне столешницы);
- подсоединить входной шланг УПЗ к втулке **(6)** на направляющей платформы;
- установить оба ящика в раму;

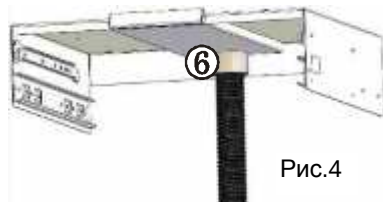


Рис.4

Удобней - из положения сидя, удерживая

на весу ящик, завести правую и левую части направляющих в ответные, предварительно вытянув их вперед. В начале движения в направляющих защелкнутся два пластиковых фиксатора. Затем с одновременным надавливанием на края фасада вкатить ящик по направляющим до конца.

- распаковать экран **(5)** и вставить его торец в паз под наклоном, спереди платформы **(4)**.

Возможна установка гибкого защитного экрана ЩИТ 3.0 ФЛЕКС (поставка по дополнительной заявке).

До задвигания платформы **(4)**, экран вынуть и уложить на столешнице рабочего стола, или в другом удобном месте.

ВНИМАНИЕ!



Не оказывать значительное давление на выдвижную платформу во избежание ее деформации и заклинивания.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По мере необходимости:

- очистить воздухопровод, выдвижную платформу от производственных отходов при помощи внешней вытяжки;
- протереть внутренние, наружные поверхности и экран от пыли влажной мягкой тканью (губкой).

ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Срок службы – 5 лет.

Гарантия не распространяется на экран.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.

Изготовитель:

620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3

ООО «ВЕГА-ПРО»

www.averon.ru

бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20

тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72

feedback@averon.ru

Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

МОДУЛЬ ВЫТЯЖНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	
ВМУ	2.0 КОМПЛЕКТ
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.