



# ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВОЗДУШНЫХ КАНАЛОВ модель ПВК 1.0



Этикетка  
АВЕ 180.000.000 ЭТ

Изготовитель:

620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3

ООО «ВЕГА-ПРО»

бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20

тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72

Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

[www.averon.ru](http://www.averon.ru)

[feedback@averon.ru](mailto:feedback@averon.ru)

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

модель ПВК 1.0	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,  
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

**1.1 Переключатель воздушных каналов ПВК 1.0** (далее - **ПВК**) предназначен для подключения двух исполнительных устройств к одной вытяжке (далее – **УПЗ**). Может использоваться с Устройством пылевсасывающим зуботехническим УПЗ-Бокс-01 «Аверон»\*, также с вытяжками других производителей. Подключение производится гофрированным шлангом, наружный D=42...44 мм, типа ШГВ 1.м АВЕРОН.

### 1.2 Основные характеристики

Число входов/выходов.... 2/1

Габариты ..... 155x140x85 мм

Масса, не более ..... 0,6 кг

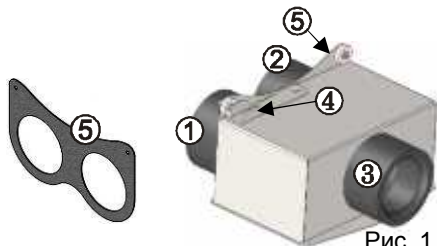


Рис. 1

## 2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Переключатель ПВК 1.0..... 1 шт

Крючок для подвешивания ..... 1

Этикетка АВЕ 180.000.000 ЭТ .... 1

☒ - МАГНИТ 1.0 ДИСК к-т магнитов - поставка по дополнительной заявке

☒ - ШГВ 1.м гофрированный шланг - поставка по дополнительной заявке

## 3 УСТРОЙСТВО, РАБОТА (рис. 1,2)

**1,2** – входы для подключения исполнительных устройств (бокс-пылесборник, пылеуловитель и пр.)

**3** – выход для подключения **УПЗ**

**4** – ручка переключения каналов

**5** – фиксатор с магнитами

**6** – отверстие для подвешивания

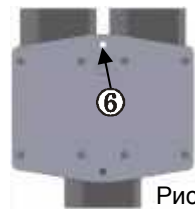


Рис. 2

Подключить входы (**1**) и (**2**) к исполнительным устройствам, выход (**3**) к **УПЗ**, вставив до упора шланги во втулки **ПВК**.

Рекомендуется располагать **ПВК** вверх входами (**1,2**), рис.2 - отходы внутри не скапливаются. **ПВК** может подвешиваться за отверстие (**6**) с помощью крючка из комплекта или крепиться к металлической (ферромагнитной) поверхности на МАГНИТ 1.0 ДИСК (поставка по дополнительной заявке).

Поворотом ручки (**4**) выбирается требуемое подсоединение устройств к **УПЗ**: одно из двух или оба одновременно. Положение ручки указывает, какой из входов закрыт. Магниты фиксатора (**5**) надежно удерживают ручку (**4**) в крайнем положении.

## 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистку корпуса **ПВК** производить отжатым тампоном, смоченным слабым мыльным раствором. Не допускать попадания жидкости внутрь **ПВК**. По окончании очистки - протереть сухой мягкой тканью.

## 5 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

\* - эксплуатация, обслуживание и гарантии - согласно своей сопроводительной документации.