




# МОДУЛЬ ВЫТЯЖНОЙ НАСТОЛЬНЫЙ

## модель ВМУ 1.0 ТЕЙБЛ

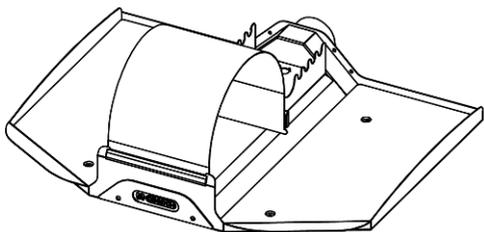

Этикетка  
АВЕ 456.000.000 ЭТ

Декларация о соответствии  
ТС № RU Д-RU.AY04.B.54749 от 19.09.2016

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

модель ВМУ 1.0 ТЕЙБЛ	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,  
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящий документ действителен для Модуля вытяжного настольного модель ВМУ 1.0 ТЕЙБЛ. ТО 5621-39-52331864-2016.

1.2 ВМУ эксплуатируется совместно с внешней вытяжкой (рекомендуется Устройство пылевсасывающее зуботехническое УПЗ-Бокс-01 «Аверон», далее - УПЗ). Предназначены для фильтрации и удаления сухих мелко/среднедисперсных отходов при механической обработке изделий в ортопедической стоматологии.

### 1.3 Особенности

Локализация и оперативное удаление отходов с рабочего места.

Воздушный канал с резиновой втулкой для быстрой стыковки/отстыковки входного шланга внешней вытяжки.

Быстросъемный гибкий защитный экран, предохраняющий лицо и глаза техника от возможного попадания в них пыли и крупных частиц, в том числе при разрушении инструмента. Для удобства транспортировки экран снимается, и конструкция имеет минимальные габариты.

Подставка для размещения наконечников бормашины, электрошпателя и пульта управления БМ 1.0 ЭКО.

Возможность установки светильника светодиодного ЛЮКС 2.1.

Съемный фильтр-сито для сбора крупных отходов.

Металлические упоры для рук, способствующие снятию усталости и напряжения при выполнении работ.

### 1.4 Условия эксплуатации

- окружающая температура 10...35°C
- влажность при 25 °С, не более 80%

### 1.5 Основные технические характеристики

- масса, не более ..... 2,2 кг
- габариты, без экрана, не более .....520×405×70мм
- диаметр подсоединяемого шланга ..... 45 мм

### 1.6 Комплектность

1 — ПОДДОН 1.0 БОКС АРТ (далее – Поддон)

2 — Экран защитный ЩИТ 3.0 ФЛЕКС

3 — Подставка

4 — ВТУЛКА 1.0 ШГВ втулка резиновая


5 — Фильтр-сито

Коврик противоскользящий – 2 шт.

Коврик полипропиленовый

правый/левый – 1/1 шт.

Этикетка АВЕ 456.000.000 ЭТ

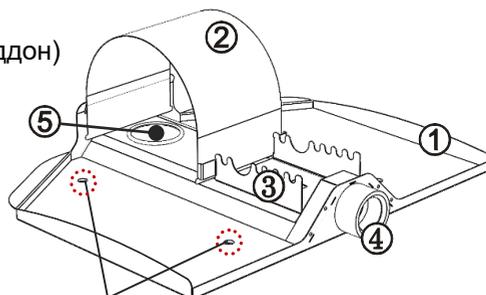

4 отверстия для фиксации на корпус УПЗ 7.2 ЦИКЛОН АРТ

☒ - Светильник светодиодный ЛЮКС 2.1

☒ - поставка по дополнительной заявке

## 2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Установить Поддон на ровную устойчивую горизонтальную поверхность. Для исключения случайных сдвигов применить противоскользящие коврики из комплекта поставки.

Установить подставку (3) вплотную к задней стенке.


Установить экран (2): один его край упереть в переднюю стенку Поддона (1), а другой – в переднюю стенку подставки (3).

Подсоединить шланг от УПЗ к втулке (4) на задней стенке Поддона.

Втулка (4) может устанавливаться сзади, выход (А) воздушного канала, или снизу поддона, выход (Б) воздушного канала.

Выход (Б) закрыт пластиковой заглушкой.

При использовании выхода (Б) – заглушить выход (А): открытым должен оставаться только 1 выход воздушного канала.

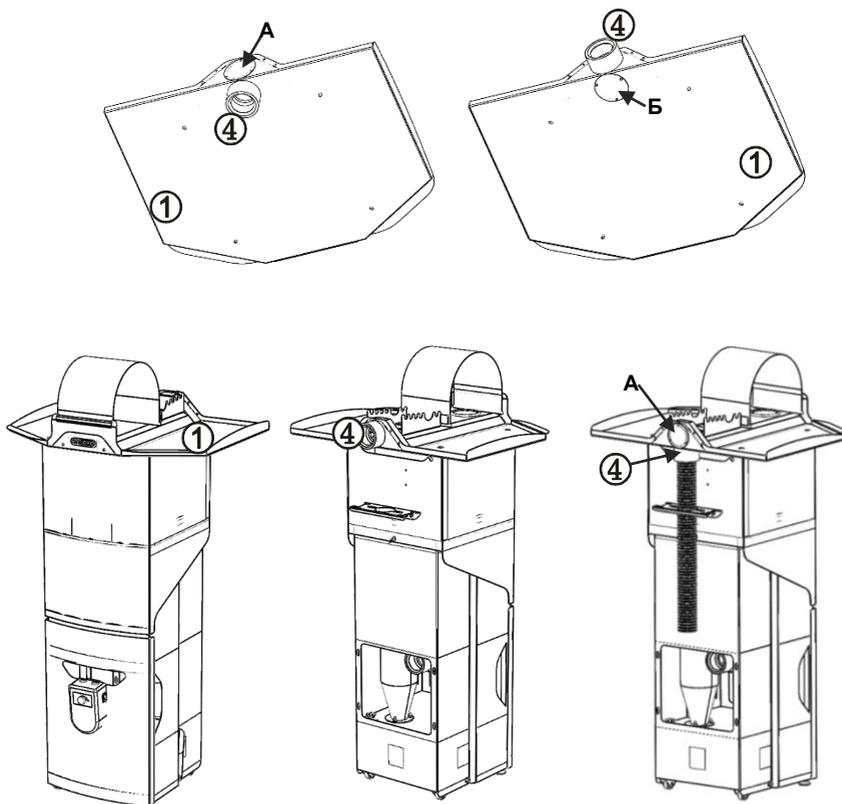

Пример установки ВМУ 1.0 ТЕЙБЛ на корпус УПЗ 7.2 ЦИКЛОН АРТ

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

Разместить используемые устройства\* на Поддоне, подставке, а УПЗ\* – в удобном месте.

Установить светильник ЛЮКС 2.1 (6) (поставка по дополнительной заявке). Для чего, закрепить его на задней стенке винтами с гайками из комплекта светильника, справа или слева.

Включить УПЗ, используемые устройства и приступить к работе.

По окончании работ отключить используемые устройства, УПЗ.



### **3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

**3.1** По мере необходимости проводятся следующие виды ухода и техобслуживания:

- очистка Поддона, съемного сита от производственных отходов при помощи УПЗ;
- протирка поверхностей Поддона, упоров для рук и защитного экрана от пыли влажной мягкой тканью (губкой).

### **4 ГАРАНТИИ**

**4.1** Гарантийный срок - 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Срок службы - не менее 5 лет. Критерием предельного состояния является невозможность или технико-экономическая нецелесообразность восстановления работоспособности.

**4.2** Гарантия не распространяется на защитный экран и лакокрасочное покрытие деталей из-за нормального износа при предусмотренном использовании. Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.

**4.3** Адрес Изготовителя:

**620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3**

**ООО «ВЕГА-ПРО»**

**бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20**

**тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72**

**Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23**

**бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02**

[www.averon.ru](http://www.averon.ru)

[feedback@averon.ru](mailto:feedback@averon.ru)

---

\* - эксплуатация, обслуживание и гарантии согласно своей сопроводительной документации.