



БОКС-ПЫЛЕСБОРНИК ОТКРЫТЫЙ Бокс-01 «Аверон»



**Этикетка
АВЕ 210.000.000 ЭТ
6.0**

ПУ № ФСР 2012/13285 от 06.04.2012

Декларация о соответствии
РОСС RU.АИ16.Д11164 от 16.05.2014

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящий документ распространяется на Бокс-пылесборник открытый Бокс-01 «Аверон», ТУ 9452-012-25014322-2002, ОКП 94 5220, 6.0 (далее - **БОКС**).

1.2 БОКС предназначен для комплектования автономного рабочего места по механической обработке изделий в зуботехнической, литейной лабораториях стоматологических учреждений.

БОКС совместно с внешним Устройством пылевсасывающим зуботехническим* (УПЗ) используется для удаления и утилизации отходов, а также защиты персонала при работе с шлифмотором*.

1.3 Условия эксплуатации

- окружающая температура 10...35°C
- влажность при 25°C, не более 80%

1.4 Основные технические характеристики

- масса, не более 2 кг
- габариты, не более 165x300x280 мм



Рис.1

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ (рис.1-3)

- 1 – корпус с полкой (6)
- 2 – лоток пластиковый - 2 шт
- 3 – экран защитный ЩИТ 1.0У
- 4 – дополнительный защитный экран
- 5 – держатели экрана (3)

Этикетка АВЕ 210.000.000 ЭТ

– 7 – светильник светодиодный ЛЮКС 2.1*

Примечание: - поставка по дополнительной заявке



Рис.2


3 КОНСТРУКЦИЯ

3.1 Экран (3) защищает лицо и глаза техника от возможного попадания пыли и крупных частиц, в том числе при разрушении инструмента. Для свободного доступа к рабочей зоне, например, при смене инструмента, снять дополнительный экран (4) и поднять экран (3).

3.2 Дополнительный экран (4) препятствует попаданию отходов обработки на одежду техника.

3.3 Смещение вытяжного отверстия от центра предотвращает попадание крупных отходов и абразива в вытяжку.

3.4 Рекомендуется один лоток применять для сбора отработанной жидкости при полировке пластмасс, а другой – для отходов при полировке металлов.

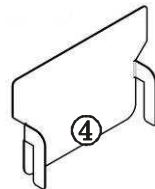

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

* - эксплуатация, обслуживание и гарантии согласно своей сопроводительной документации.

4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- установить **БОКС** и шлифмотор на ровную, устойчивую, горизонтальную поверхность;



- установить экран (3) в держателях (5) так, чтобы его **верхний край упирался в потолок БОКСА**, а плоскость экрана не касалась шлифовального круга, в этом положении зафиксировать экран винтами держателя;

- при наличии, закрепить светильник ЛЮКС 2.1 (7), рис.3 (по дополнительной заявке);

- установить лоток (2) емкостью внутрь **БОКСА**;

- установить дополнительный экран (4);

- подсоединить шланг от внешнего **УПЗ** к резиновой втулке (8);

- включить **УПЗ**, светильник, шлифмотор и приступить к работе;

- по окончании работ выключить используемые устройства.

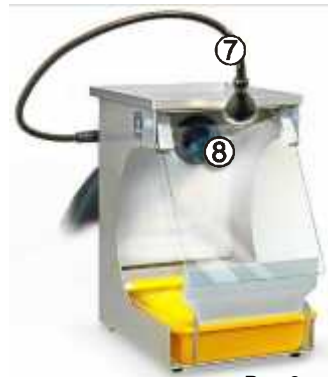


Рис.3

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По мере необходимости:

- очистить пластиковый лоток от производственных отходов;

- протереть внутренние, наружные поверхности, экран от пыли влажной мягкой тканью (губкой);

- очистить внутреннюю поверхность **БОКСА** при помощи **УПЗ**.

6 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется на защитный экран ЩИТ 1.0У, а также лакокрасочное покрытие деталей из-за нормального износа при предусмотренном использовании.

Срок службы - не менее 5 лет. Критерием предельного состояния является невозможность или технико-экономическая нецелесообразность восстановления работоспособности.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.

Изготовитель:

620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО» www.averon.ru

бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20

тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72

Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

feedback@averon.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

6.0	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.



АВЕРОН

научно-производственный комплекс

Учебный центр АВЕРОН

приглашает на обучение
зубных техников, врачей,
руководителей и администраторов
стоматологических учреждений

Программа на
<http://www.uc-averon.ru>

