



EAC



СТОЛИК ПОДКАТНОЙ ПРИБОРНЫЙ

модель

| | |
|----------------|--|
| СПП 1.0 | |
| СПП 1.1 | |



СПП 1.0



СПП 1.1

Декларация о соответствии
TC N RU D-RU.AI16.B.02124 от 30.07.2015

Этикетка
АВЕ 148.000.000 ЭТ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем. Срок службы – 5 лет.
Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| модель СПП 1.0 | Зав. номер |
| модель СПП 1.1 | Зав. номер |
| Контролер ООО «ВЕГА-ПРО» | _____ м.п. (подпись) |
| Дата выпуска _____ | Упаковщик м.п. _____ |
| Дата продажи _____ | Продавец м.п. _____ |

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено, то гарантия исчисляется с даты выпуска.

Столик подкатной приборный СПП 1.х (далее – СПП) - предназначен для компактного размещения оборудования и инструментов. ТО 5621-39-52331864-2015, ТН ВЭД 9403105800.

Условия эксплуатации

окружающая температура..... 10...35 °С
 влажность при 25 °С, не более 80 %

Основные технические характеристики

максимальная нагрузка на одну полку 10 кг
 масса, не более 10 кг
 габариты 400×420×720 мм

| Комплектация | | шт | | | шт | | |
|----------------------|-----|----|------------------------------------|------|--------------------|-----|----|
| основание | — 1 | | винт М 4×12 | — 24 | для СПП 1.0 | | шт |
| стойка боковая...— 2 | | | гайка М4 | — 24 | полка | — 3 | |
| опоры | — 4 | | шайба 4..... | — 24 | для СПП 1.1 | | |
| планка | — 2 | | шайба гр.4..... | — 24 | полка | — 2 | |
| перекладина | — 1 | | шайба 5 | — 4 | полка с ящичком . | — 1 | |
| | | | шайба гр.5 | — 4 | | | |
| | | | гайка колпачковая М5 | — 4 | | | |
| | | | декоративный колпачок для гайки М5 | — 4 | | | |

ПОРЯДОК СБОРКИ (рис.1-7)

Рекомендуется для облегчения и ускорения сборки использовать электроинструмент (шурупверт, электроотвертка).

Установить и закрепить опоры (2) на основании (1) с помощью шайб 5, шайб гр.5 и гаек колп. М5. Установить декоративные колпачки на гайки.

УСТАНОВИТЬ И ЗАКРЕПИТЬ винтами, гайками, шайбами и шайбами гровера из комплекта:

- боковые стойки (3);
- перекладину (4);
- полки (с ящичком, для СПП 1.1) последовательно снизу вверх.

Установить в боковых стойках (3) декоративные планки, подогнуть их язычки, рис.7.

Столик подкатной приборный готов к работе.

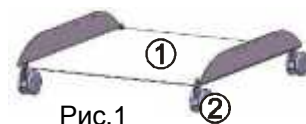


Рис.1

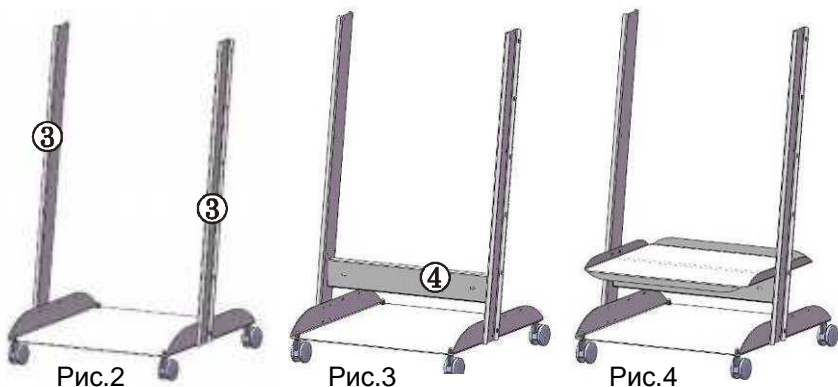


Рис.2

Рис.3

Рис.4


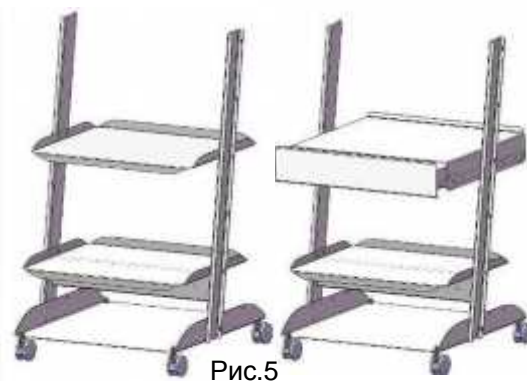


Рис.5

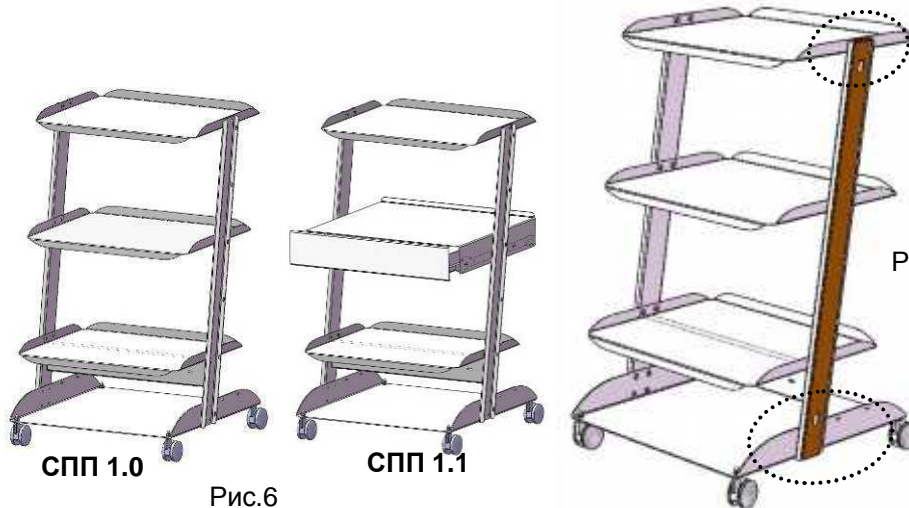

СПП 1.0

СПП 1.1

Рис.6

Рис.7

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.