



EAC



СТОЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ модель СУЛ 8.1 М ОВЕН

Декларация о соответствии
TC N RU D-RU.AИ16.B.02124 от 30.07.2015



**Этикетка
ABE 288.000.002 ЭТ**

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящий документ действителен для Стола универсального лабораторного модель СУЛ 8.1 М ОВЕН (далее – СУЛ). ТО 5621-39-52331864-2015, ТН ВЭД 9403105800.

1.2 СУЛ предназначен для компактного размещения медицинского оборудования и инструментов.

1.3 Условия эксплуатации

- окружающая температура..... 10-35 °С
- влажность при 25°С, не более 80 %

1.4 Основные технические характеристики

- габариты СУЛ400×535×625 мм
- габариты подставки.....400×250×65 мм
- масса СУЛ, не более..... 20 кг
- максимальная нагрузка на столешницу 60 кг
- максимальная загрузка ящика 10 кг

1.5 Особенности

Оптимален для размещения электровакуумной печи ЭВП АВЕРОН и вакуумнасоса ВН АВЕРОН.

Со столом СЗТ АВЕРОН образует законченное рабочее место зубного техника, может размещаться под столешницей с установленным модулем КОМПЛЕКТ 1.0.

Специальный отсек с подставкой для ВН (9).

Кабель-каналы (6) - для удобства размещения и подвязки проводов, кабелей, шлангов.

Для перемещения тумбы на колесных опорах (8), установленных сзади, приподнять передний край.

Регулируемые по высоте опоры (7).

Верхний ящик (4) с замком (5).

Возможность установки ПАНЕЛИ 1.0 ТУМБА (см. ЭД на изделие), рис.1.

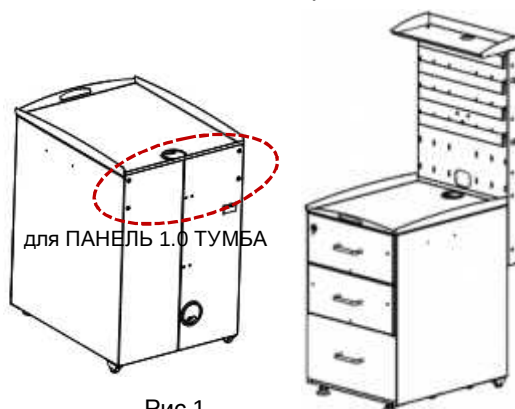


Рис.1

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

	шт
СУЛ в сборе	– 1
Подставка для ВН.....	– 1
Крепеж установлен по месту	
Коврик для столешницы ...	– 1
ящика ...	– 1
Лоток пластиковый	– 1
Этикетка АВЕ 288.000.002 ЭТ	

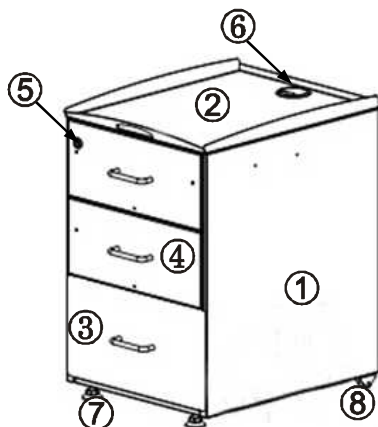


Рис.2

3 КОНСТРУКЦИЯ (рис.2,3)

- 1 – Рама левая/правая
- 2 – Столешница
- 3 – Крышка с ручкой
- 4 – Ящик
- 5 – Замок с двумя ключами
- 6 – Кабель-канал с заглушкой
- 7 – Опоры
- 8 – Колесные опоры
- 9 – Подставка для ВН

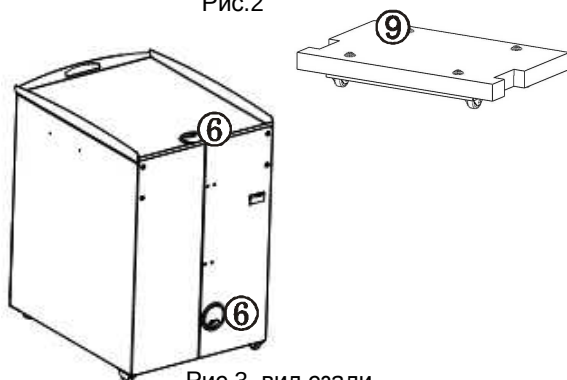


Рис.3, вид сзади

4 ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рекомендуется для облегчения и ускорения сборки использовать электроинструмент (шуруповерт, электроотвертка).

- 1. Убрать транспортировочные вкладыши.
- 2. Столешницу (2) тумбы выровнять горизонтально вращением опор (8).
- 3. Установить ручки ящиков и крышки из транспортного положения в рабочее.
- 4. Для размещения ВН снять крышку (3), установить подставку (9), используя пазы и направляющие рам.

Вариант размещения оборудования приведен на рис.4.



Рис.4

ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.

Изготовитель:

620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО» www.averon.ru

бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20

тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72

feedback@averon.ru

Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

модель СУЛ 8.1 М ОВЕН	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.