



**EAC**



## **ТУМБА ПОДКАТНАЯ модель ТУМБА 1.1 М**

Декларация о соответствии  
TC N RU D-RU.АИ16.В.02124 от 30.07.2015



**Этикетка  
АВЕ 285.000.001 ЭТ**

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящий документ действителен для Тумбы подкатной модель ТУМБА 1.1 М (далее – тумба). ТО 5621-39-52331864-2015, ТН ВЭД 9403105800.

### 1.2 Условия эксплуатации

- окружающая температура ..... 10-35 °С
- влажность при 25°С, не более..... 80 %

### 1.3 Основные технические характеристики

- габариты ..... 400×540×625 мм
- размер столешницы..... 400×500 мм
- масса, не более ..... 20 кг
- максимальная нагрузка на столешницу ..... 60 кг

### 1.4 Особенности, рис.1-3

Оптимальна для размещения электровакуумной печи ЭВП АБЕРОН.

Со столом СЗТ АБЕРОН образует законченное рабочее место зубного техника.

Может размещаться под столешницей с установленным модулем выдвижных ящиков КОМПЛЕКТ 1.0.

Полностью металлическое исполнение.

Для перемещения тумбы на роликах (2), установленных сзади, приподнять передний край.

Опоры (3) регулируются по высоте.

Ящики с шариковыми направляющими полного выдвижения.

Нижний ящик (5) – большей вместимости. Верхний ящик (6) – с замком (7).

В двух ящиках и на столешнице (8) размещены износостойкие коврики.

Возможность установки справа и слева бормашины БМ ЭКО ПРОФИ.

Возможность установки ПАНЕЛИ 1.0 ТУМБА (см. ЭД на изделие).



Рис.1  
Вид сзади

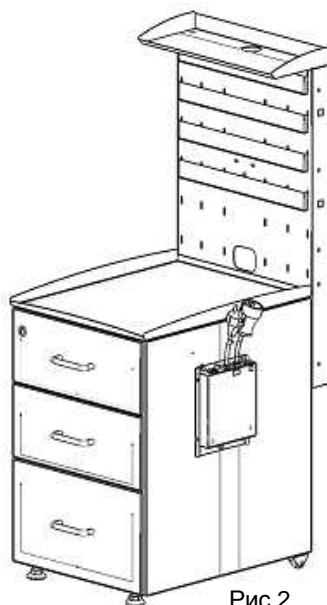


Рис.2

## 2 КОМПЛЕКТНОСТЬ, рис.3 ШТ

Тумба (1) в сборе – 1

Ручка (4) – 3

Коврик для столешницы – 1

ящичков – 2

Лоток пластиковый – 1

Крепеж установлен по месту

Этикетка АВЕ 285.000.001 ЭТ

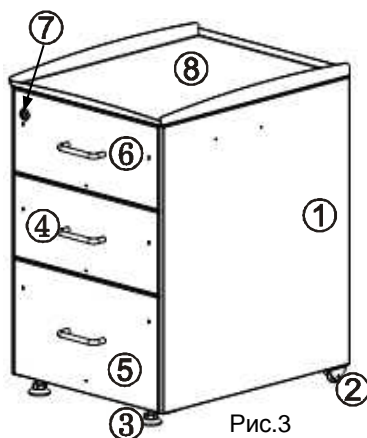


Рис.3

## 3 ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рекомендуется для облегчения и ускорения подготовки использовать электроинструмент (шуруповерт, электроотвертка).

1. Убрать транспортировочные вкладыши (9), рис. 4.
2. Столешницу (8) тумбы выровнять горизонтально вращением опор (3).
3. Установить ручки ящичков из транспортного положения в рабочее.

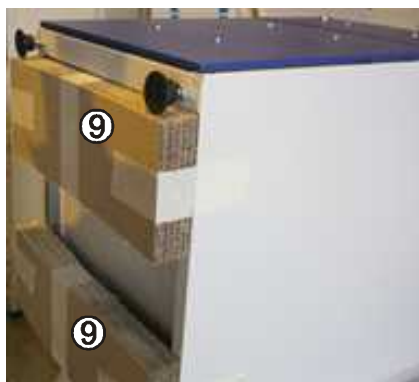


Рис. 4

### ВНИМАНИЕ!



Максимальная загрузка ящичков – 15 кг.

## 4 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.

### Изготовитель:

620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3

ООО «ВЕГА-ПРО»

бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20

тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72

Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

[www.averon.ru](http://www.averon.ru)

[feedback@averon.ru](mailto:feedback@averon.ru)

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

<b>модель ТУМБА 1.1 М</b>	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п. _____ (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,  
то гарантия исчисляется с даты выпуска.