



ЕАС



**Лампа
для сушки
окрашиваемых изделий
из оксида циркония
ЛАМПА 1.0 ЦИРКОН**



Декларация о соответствии
ЕАЭС N RU Д-RU.НВ11.В.04188/20
от 11.02.2020

**Этикетка
АВЕ 638.000.000 ЭТ**

для CAD-CAM систем

ПРАЙС АВЕРОН всегда под рукой на мобильном



Приложение ПРАЙС АВЕРОН для Android
на



<https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.averon.averonpricexml1>



Приложение ПРАЙС АВЕРОН для IOS
(iPhone и iPad) на

<https://apps.apple.com/ru/app/прайс-аверон/id1484614177>



1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 ЛАМПА 1.0 ЦИРКОН (далее - ЛАМПА) серии ЛАМПА ЦИРКОН, предназначена для сушки окрашиваемых изделий из оксида циркония. ТУ 27.90.11-069-52331864-2020.

Предназначена для совместной работы с ЭМП 1.0 ЦИРКОН.

1.2 Особенности

- инфракрасная лампа **(1)** мощностью 250 Вт (далее ИК-лампа) с выключателем **(2)**;
- регулировка положения ИК-лампы по высоте, в диапазоне 60...110 мм от основания до колбы.

2 ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Условия эксплуатации

- окружающая температура 10...35 °С
- влажность при 25 °С, не более 80 %

2.2 Основные технические характеристики

- электропитание ~220В 50Гц 1,2А
- мощность ИК-лампы 250 Вт
- габариты (ШхГхВ), не более 150×195×330 мм
- масса, не более 2,5 кг

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

ЛАМПА 1.0 ЦИРКОН 1 шт.

Этикетка АВЕ 638.000.000 ЭТ 1 шт.

Поставка по дополнительной заявке

☒ Сменная инфракрасная лампа ЛС 1.0 ЦИРКОН.

4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

• Перед началом эксплуатации отрегулировать лампу на высоту примерно 90 мм от основания, ослабив барашек **(3)** на задней стенке ЛАМПЫ. Переместить ИК-лампу на нужную высоту и затянуть барашек.

ИК-лампу голыми руками не трогать во избежание преждевременного выхода её из строя, использовать чистые салфетки, ветошь или ХБ-перчатки.

• Промыть изделие под проточной водой для удаления пыли и поместить под ИК-лампу.

• Включить ЛАМПУ выключателем **(2)**. Просушить изделие не менее 20 мин.

• Высушенное изделие можно подвергать покраске (см. инструкцию на краситель).

• Окрашенное изделие поместить под ИК-лампу. Просушить до полного высыхания, но не менее 20 мин.



5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техобслуживание проводить после отключения ЛАМПЫ от сети.

Замена ИК-лампы:

- ослабить барашек на задней стенке и опустить ИК-лампу в нижнее положение;
- выкрутить ИК-лампу из патрона против часовой стрелки;
- закрутить новую ИК-лампу в патрон. Здесь и далее ИК-лампу голыми руками не трогать, использовать чистые салфетки, ветошь или ХБ-перчатки.
- поднять ИК-лампу на нужную высоту и затянуть барашек на задней стенке.

6 УТИЛИЗАЦИЯ

В составе ЛАМПЫ не содержится драгметаллов и опасных веществ. Специальных мер по утилизации (уничтожению) ЛАМПЫ не требуется.

7 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок - 24 месяца с даты продажи или, если она не указана, то с даты выпуска Изготовителем, кроме инфракрасной лампы.

Гарантийный срок на ИК-лампу - 6 месяцев с даты продажи.

Установленный Изготовителем срок службы ИК-лампы - 6500 часов.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений, нарушении эксплуатации ИК-лампы или не санкционированного Изготовителем доступа в конструкцию.

Изготовитель:

620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО» www.averon.ru

бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20

тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72

feedback@averon.ru

Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

ЛАМПА 1.0 ЦИРКОН	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	
Дата выпуска _____	Упаковщик _____
Дата продажи _____	Продавец _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено, то гарантия исчисляется с даты выпуска.

Разрешительные документы для указанной продукции см. на сайте www.averon.ru.

КОНТАКТЫ АВЕРОН			
	averon.ru		Averon Russia
	8 800 700-12-20 бесплатный по РФ		АВЕРОН - оборудование для зубных техников
	feedback@averon.ru		instagram.com/ averon.ru
Присоединяйтесь к нам в соц. сетях!			