



СТУЛ ЗУБНОГО ТЕХНИКА модель СТУЛ 1.1 МАСТЕР



Этикетка
АВЕ 484.000.000 ЭТ

многофункциональный стул
со встроенным тренажером и отсеками для хранения

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей
технической документации

Исправления не допускаются

модель СТУЛ 1.1 МАСТЕР	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящий документ действителен для Стула зубного техника модель **СТУЛ 1.1 МАСТЕР** (далее – стул).

1.2 Стул предназначен для укомплектования автономного рабочего места зубного техника.

1.3 Условия эксплуатации

- окружающая температура10...35°С
- влажность при 25 °С, не более 80%

1.4 Основные технические характеристики

- габариты (ШхВхГ), не более.....630х920х600 мм
- ширина сиденья.....440 мм
- глубина сиденья.....400 мм
- высота сиденья.....500-570 мм
- максимальная нагрузка 110 кг
- масса, не более8,5 кг


1.5 Особенности

- компактный, мобильный – легко перемещается на колесах;
- встроенный тренажер для выполнения упражнений, снимающих утомление;
- на задней стенке карманы, позволяющие убирать лишние вещи из рабочей зоны;
- ручки эспандера можно убрать в нижний задний карман или повесить на зацепы.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

ШТ



- 1 — сиденье со спинкой..... - 1
 - 2 — крестовина - 1
 - 3 — колесная опора..... - 5
 - 4 — пневмолифт
с регулировочной ручкой (5)..... - 1
 - 6 — эспандер с хомутами..... -1
 - 8 — опорная площадка..... -1
- Этикетка АВЕ 484.000.000 ЭТ

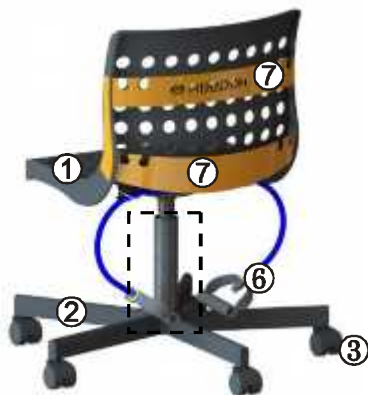


3 ПОРЯДОК СБОРКИ

Во избежание перекосов стул собирать на ровной поверхности в вертикальном положении.

- ❶ Собрать крестовину: вставить ножки в основание и зафиксировать винтами. Прикрепить колесные опоры к крестовине.

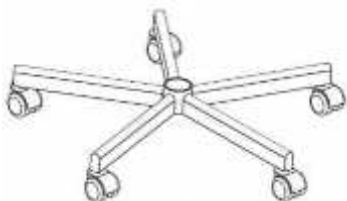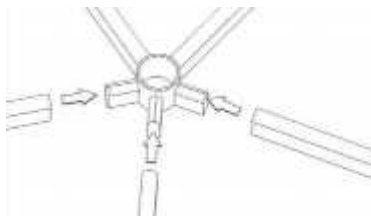

- ❷ Прикрепить пневмолифт, установив его основание в отверстие крестовины

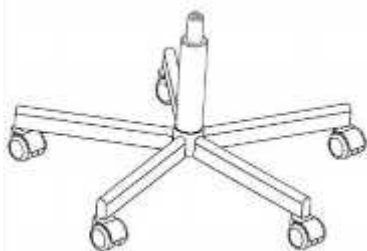

❸ УСТАНОВИТЬ

- эспандер (6) снизу сиденья и зафиксировать хомутами вокруг задних выступов крепления опорной площадки (8), рис.а;
- опорную площадку (8) на четырех выступах снизу сиденья, рис.б;
- сиденье на крестовину с пневмолифтом.

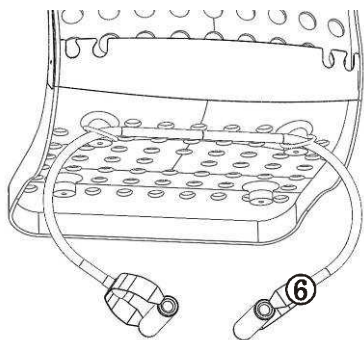


рис.а

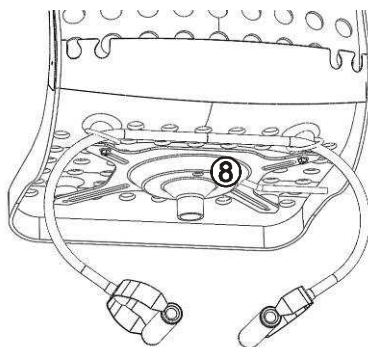


рис.б

4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Высота сиденья регулируется с помощью ручки пневмолифта.

При необходимости, убрать из рабочей зоны и разместить в карманах (7) не используемые в текущей работе инструменты, материалы и др.

Для снятия утомления при длительных работах рекомендуется выполнить комплекс разминочных упражнений.

Видеокурс с упражнениями, разработанными специально для выполнения на СТУЛ 1.x МАСТЕР, смотрите на странице «Рабочие места и принадлежности/Столы зубного техника/СТУЛ 1.1 МАСТЕР» (вкладка «Видео») на сайте www.averon.ru.



Внимание !

Соблюдать осторожность при пользовании эспандером – следить за исправностью, не прилагать излишних усилий во избежание травм.

5 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Изготовитель:

620102, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО»

бесплатный звонок по России 8 804 333-19-20

тел. (343) 234-65-86, 311-11-21, факс (343) 234-65-72

сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

www.averon.ru

feedback@averon.ru